

新型コロナウイルス検査における唾液採取方法（来社採取用）

1. 採取の前に

採取前、最低でも **10 分前に飲食・飲水・歯磨・うがいをおこなっていない**ことを確認してください。

ラベルに検査を受けられる方の**お名前、採取日**をご記入お願いします。

2. 採取キット内容：不足があれば職員にお声掛けください。

- (1) ビニール袋（中・小）
- (2) 採取容器



ビニール袋（中・小）

採取容器

3. 採取方法

- (1) 口を閉じて口の中に唾液が溜まるのを待つ。
- (2) 採取容器のフタを開けて、唾液を直接滴下する（図1左）。
※なるべく泡が入らないように注意。
- (3) 容器に2mL程度に達するまで(2)と(3)を繰り返す（図1右、黒線）。
※少し多くても構いません
- (4) 滴下後、しっかり採取容器のフタをしめる。
- (5) 採取容器をもとのとおりビニール袋（小）・（中）の順に二重に入れ、職員に渡す。

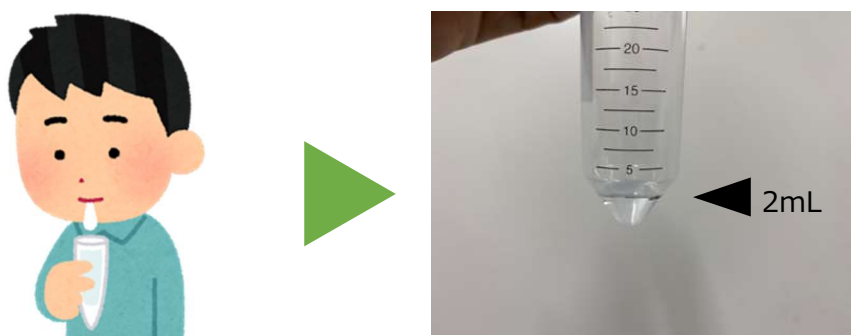


図1 唾液の滴下イメージ

終了です。お疲れ様でした。